

# Інструкція з експлуатації

## ECOSTEP

- ▶ доступний
- ▶ легко переносити
- ▶ простий в використанні

### ▶ Апарат для надягання бахіл

#### ▶ ECOSTEP / 88818

##### Специфікація упаковки

Розміри пристрою:

56 x 26 x 22 см

Розміри коробки:

56,5 x 26 x 22 см

Вага нетто: 3 кг

Вага брутто: 4 кг

##### Комплектація

Апарат для надягання бахіл: 1 шт

Інструкція з експлуатації: 1 шт



Кількість  
бахіл **50**

#### ▶ ECOSTEP COMFORT / 88817

##### Специфікація упаковки

Розміри пристрою:

65 x 25 x 96 см

Розміри коробки:

102,5 x 30 x 70 см

Вага нетто: 5 кг

Вага брутто: 8 кг

##### Комплектація

Апарат для надягання бахіл: 1 шт

Рукоятка: 1 шт

Монтажні гвинти: 2 шт

Інструкція з експлуатації: 1 шт



Кількість  
бахіл **100**

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ АПАРАТІВ ECOSTEP І ECOSTEP COMFORT

Ваш апарат для надягання бахіл механічний; працює без живлення та акумулятора.

### КРОК 1: ЗАПОВНІТЬ БАХІЛАМИ

1. Візьміть упаковку бахіл і приберіть пакувальний пакет. (Мал. 1)
2. Випряміть з'єднувальні палички. (Мал. 2)
3. Покладіть (протисніть) пачку бахіл в отвір апарату.

Переконайтесь, що ви просуваєте упаковку нижньою стороною і тримайте затискачі (кліпси) в отворі на прорізах. (Мал. 3)


4. Витягніть з'єднувальну палицю. (Мал. 4)
5. Витягніть першу бахілу рукою в місці наядання.

**Ваш апарат готовий до використання.**




### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ ДЛЯ НАДЯГАННЯ БАХІЛ

Поставте стопу з каблучком у бахілу, а потім потягніть її назад, поки бахіла не вийде з апарата, автоматично вдягнувшись на ногу.

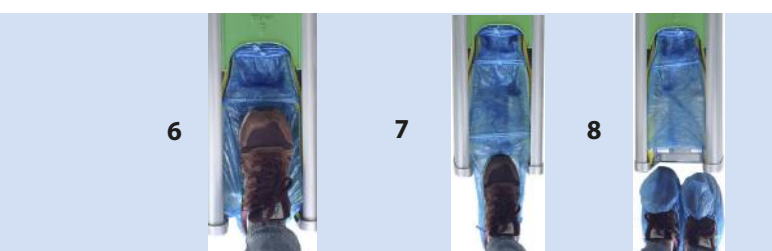

### МОНТАЖ ECOSTEP COMFORT

1. Станьте з задньої частини апарата і відкрийте верхню кришку. (Мал. 1)
2. Візьміть одну упаковку бахіл і покладіть її в отвір апарата. Переконайтесь, що ви просуваєте упаковку нижньою стороною і тримайте затискачі (кліпси) в отворі на прорізах. (Мал. 2 і Мал. 3)
3. Витягніть з'єднувальну палицю. (Мал. 4)
4. Підніміть передні ворота і підтягніть першу бахілу. (Мал. 5, Мал. 6 і Мал. 7)
5. Закрийте передні ворота та верхню кришку, тепер ваш апарат готовий до використання. (Мал. 8)

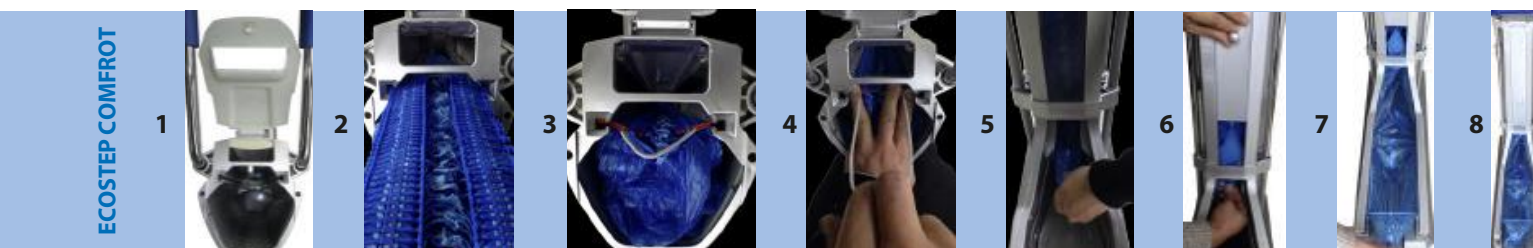

### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ ДЛЯ НАДЯГАННЯ БАХІЛ

Поставте стопу з каблучком у бахілу, а потім потягніть її назад, поки бахіла не вийде з апарата, автоматично вдягнувшись на ногу.

**Попередження: Будь ласка, тримайте ручку, щоб міцно стояти під час використання.**



### ПОРАДА ДЛЯ ECOSTEP І ECOSTEP COMFORT

Поставте ступню всередину бахіли і тягніть бахілу назад в горизонтальному напрямку.