


HYGOMAT

- Classic
- Comfort
- Cleanroom

УВАГА: НЕЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, НЕОБХІДНО ЗМАЩУВАТИ НАПРЯМНІ РЕЙКИ РІДКИМ МАСТИЛОМ КОЖНІ 6 МІСЯЦІВ.

МОНТАЖ

1. Зберіть машину, як показано на зображенні I-1. Відкрийте кришку, як показано на зображенні I-2.
Для моделей Comfort / Cleanroom: прикріпіть рукоятку з гвинтами, як показано на зображенні I-1a.
2. Тепер візьміть один картридж бахіл в касеті обома руками і посуньте пластикові вкладиші в напрямну з обох боків. Показано на зображенні I-3. (У випадку, якщо зазор не є правильним, його можна регулювати з лівого та правого боку пластикових тримачів)
3. Злегка натискайте картридж за бахілами вперед, а потім тримайте його прямо, щоб переконатися, що всі пластикові тримачі розташовані всередині направляючої шини. Показано на зображенні I-4.
4. Постійно притискайте картридж з обох сторін обома руками до направляючої шини, доки всі бахіли не будуть розташовані під місцем фіксації і всередині наведення, як показано на зображенні I-5.

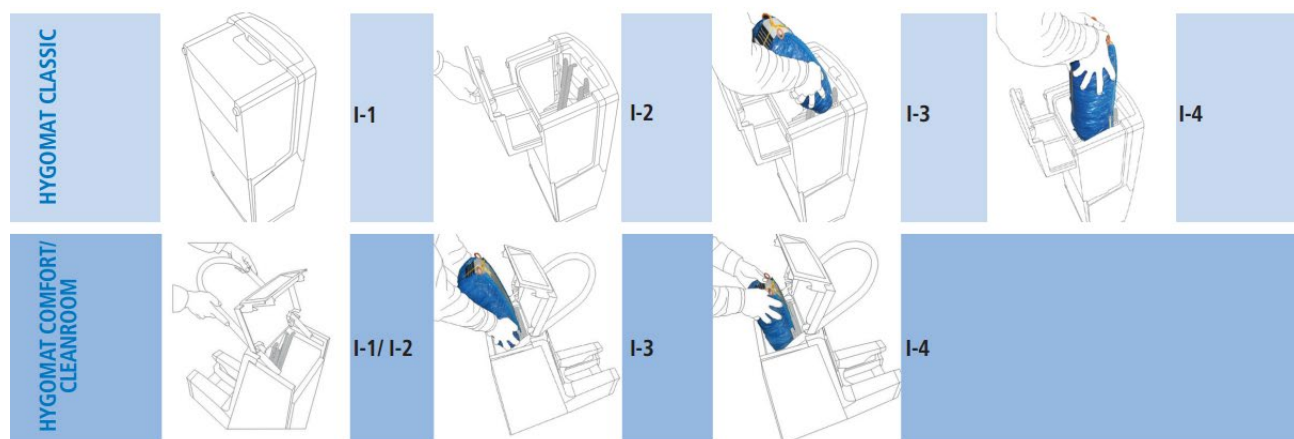


5. Роз'єднайте стрічку, що утримує бахіли, і зніміть її, як показано на зображенні I-6.

6. Зніміть картон, як показано на зображенні I-7.

7. Зніміть пластикову фіксуючу смужку з обох боків картриджів, утримуючи бахіли на одній руці. Іншою рукою тримайте пластмасове кільце і повністю витягніть його з машини, як показано на зображенні I-8.

8. Просуньте обидві сторони картриджу обома руками і просуньте всі бахіли всередину доріжок, поки остання частина не буде повністю вставлена в доріжку, над положенням блокування, як показано на зображенні I-9.

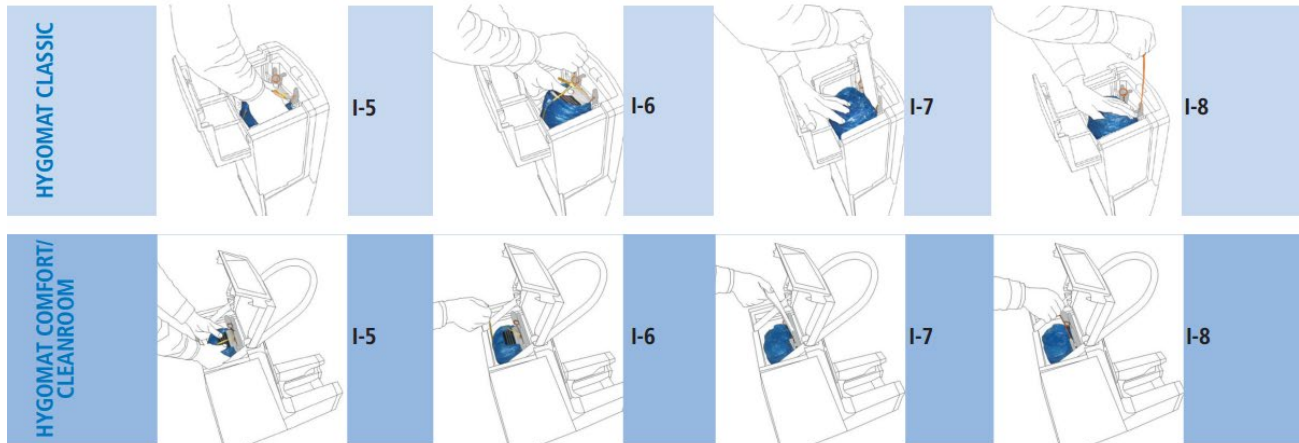


HYGOMAT COMFORT / CLEANROOM - Варіанти реалізації:

09. Перша бахіла другого картриджа має бути прикріплена до останньої бахіли першого картриджа.

10. Наведіть останню бахілу на напрямну, як показано на зображенні I-9.

11. Відкрийте замки, штовхаючи їх вниз.

12. Витягніть два пластикові тримачі з останньої бахіли, як показано на схемі I-11.

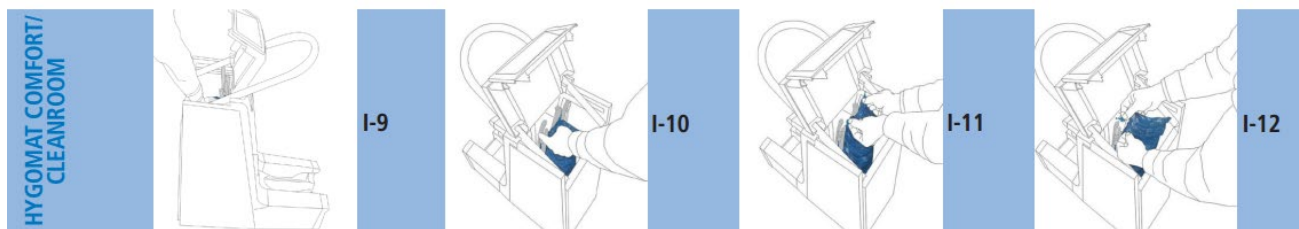


13. Зніміть 2 пластикові тримачі цієї бахіли, як показано на зображенні I-12.

14. Зніміть пластикові тримачі з другого картриджа з правої пластикової сторони, як показано на зображенні I-13.

15. Прикріпіть перший пластиковий держатель другого картриджа до останньої бахіли першого картриджа, як показано на зображенні I-14.

16. Проведіть пластмасовий утримувач другого картриджа вздовж направляючої шини і проштовхніть його достатньо, щоб настільки довгий замок знаходився в напрямній рейці, як показано на зображенні I-15.

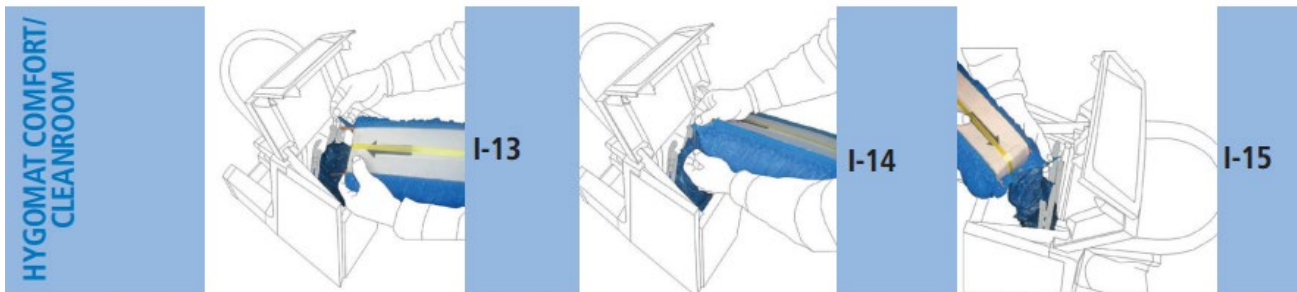

ПРОДОВЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ:

17. Повторіть кроки 16 - 18 для лівої сторони пластикового тримача.

18. Повторіть кроки 2 - 7 для другого картриджа.

19. Закрийте кришку і витягніть першу бахілу з отвору, що знаходиться під металевою пластиною, як показано на зображенні I-16.

20. Проведіть бахілу вздовж направляючої шини, поки вона не досягне фіксатору, як показано на зображенні I-17.

21. Тепер апарат для надягання бахіл готовий до використання, як показано на схемі I-18.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ:

ПРОБЛЕМА: Одна або обидві сторони пластикових тримачів не знаходяться в напрямній рейці, як показано на схемі I-19.

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ: Пластикові тримачі не були точно вставлені в направляючі.

РІШЕННЯ: Будь ласка, переконайтеся, що всі пластмасові тримачі знаходяться в напрямній рейці, як показано на зображенні I-20.



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ ДЛЯ НАДЯГАННЯ БАХІЛ:

1. Вставте одну ногу всередину бахіли, як показано на зображенні I-21.
2. Потягніть ногу назад, зачепивши п'ятою бахілу, як показано на зображенні I-22.
3. Продовжуйте повільно витягувати ногу, доки кліпи не вийдуть з доріжок.



ВАЖЛИВО:


1. Під час встановлення бахіл, будь ласка, переконайтеся, що пластикові кліпси всередині доріжок.
2. Під час використання, покладіть ногу всередину бахіли і потягніть бахілу в горизонтальному напрямку. Не піднімайте передню частину ноги занадто високо.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА: Нога знаходиться лише наполовину всередині бахіли, як показано на зображенні I-24.

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ: При витяганні бахіли назад, користувач підняв передню частину ноги занадто високо, тому нога не знаходиться всередині бахіли, як показано на зображенні I-25.

РІШЕННЯ: Вставте ногу всередину бахіли і потягніть бахілу в горизонтальному напрямку, як показано на зображенні I-26.

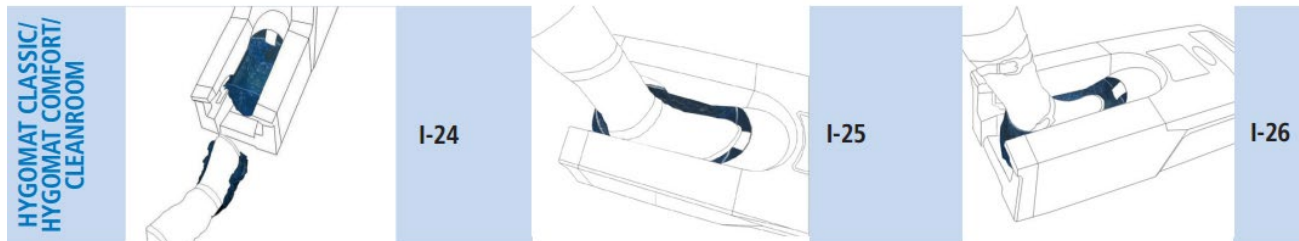


ТІЛЬКИ ДЛЯ HYGOMAT CLEANROOM:

Hygomat Cleanroom можна очищати всіма звичайними миючими засобами і дезинфікувати завдяки своїм боковим деталям з нержавіючої сталі та задній частині з нержавіючої сталі.

ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛІС:

Для монтажу валків використовуйте всі 4 гвинти.

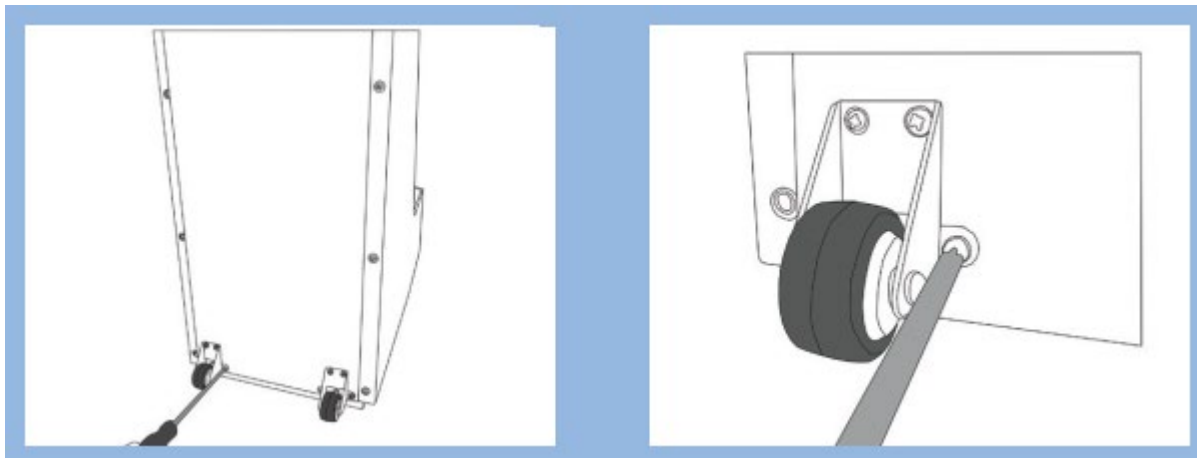

ЯКЩО ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ

Якщо у вас залишилися питання з інструкцій по монтажу або використанню, будь ласка, відвідайте сторінку вашого продукту на сайті офіційного дистриб'ютора ТОВ «ТОПТРЕЙДСЕРВІС» - www.tradeport.com.ua. Тут ви знайдете відео ролики по використанню апаратів.

Або зателефонуйте в офіс: +38 044 227 73 55 / +38 096 227 76 55.

Сервісний центр: проспект Леся Курбаса, 2Б – 03148, Київ, Україна.